

Les tiques vivent dans l'herbe, les arbustes, la bruyère et la végétation basse. Êtes-vous allé dans la nature ? Vérifiez toujours la présence de tiques sur vous !

Si vous trouvez une morsure de tique, il est très important de retirer la tique rapidement, correctement et en toute sécurité. Retirez la tique dans les huit heures pour minimiser le risque d'infection. Ne pas assommer la tique avec de l'alcool ou d'autres drogues. Ne chauffez pas la tique, pas même avec une cigarette. En effet, si vous étourdissez ou chauffez une tique, elle entre en état de choc et, en réaction, libère ses agents pathogènes par sa salive. En utilisant une bonne pince à tiques, vous éviterez que la tique ne vous donne sa salive contenant d'éventuels agents pathogènes. Ensuite, désinfectez la plaie avec de l'alcool. Notez dans votre journal la date de la morsure de tique, l'endroit de la morsure sur votre corps et la zone où vous avez reçu la morsure de tique.

Mode d'emploi

1. Saisissez la tique avec le pouce et le majeur et appuyez avec votre index sur la partie arrière de la pince : celle-ci s'ouvrira.
2. Placez la pince prudemment sur la tique - aussi près que possible de la peau - et laissez ensuite la pince se fermer.
3. Tournez la tique qui est coincée un petit tour vers la gauche, puis un petit tour vers la droite, de sorte que la tique se détache partiellement. Tirez ensuite la tique verticalement de la peau en quelques brefs mouvements prudents.
4. Désinfectez l'endroit de la morsure et notez la date de la morsure dans votre agenda.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro d'article
38395

EAN
8714024383958

Poids
25 g

Dimensions de l'emballage L x l x h
30 x 80 x 135 mm

Unité de commande
6



EN BREF

- Pour une extraction de la tique facile, rapide et en toute sécurité
- Pince de conception spéciale (également pour les nymphes)
- Risque minime d'endommager la tique
- Fourni avec deux tampons imbibés d'alcool pour désinfecter l'endroit de la morsure après avoir éliminé la tique.